



1 **KLIK**



Trek en duw tegen de meterhendel om de glucosemeter in te schakelen en een teststrip naar buiten te schuiven.

2 **PRIK**



Plaats het prikapparaat stevig op de gewenste prikplaats en druk op de blauwe vrijgaveknop. De MICROLET<sup>®</sup> lancetten zijn voorzien van een siliconen laagje waardoor prikken vrijwel pijnloos is.

3 **GO**



Raak met de teststrip de bloeddruppel aan totdat de meter piept. Het bloed wordt automatisch opgezogen en binnen 5 seconden wordt het resultaat weergegeven.



Houd de meter met de teststrip omlaag en druk op de blauwe vrijgaveknop om de strip te verwijderen.

# BREEZE®2

Teststrips in de meter



Coderen niet nodig

NIEUW

Testen in 5 seconden

NIEUW

Slechts 1 microliter bloed nodig

NIEUW

Geheugencapaciteit: 420 resultaten

1 testschijf met 10 strips  
in de meter



## BREEZE®2 Testschijf plaatsen



**Open**




**Testschijf plaatsen**

Plaats testschijf met de platte kant naar beneden.



**Sluiten**

### Bedieningsklepje openen

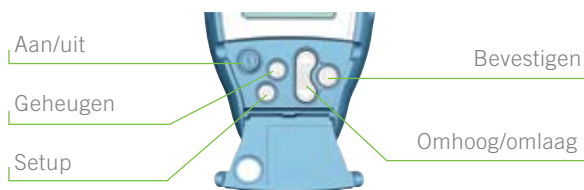

### Achterkant



De BREEZE®2 maakt gebruik van de BREEZE®2 testschijf.

10 strips verpakt in 1 testschijf, dus geen losse strips meer.



**Bayer HealthCare**  
Diabetes Care

Diabetes Care  
Postbus 80  
3640 AB Mijdrecht  
0800- 235 229 37 (gratis)  
www.bayerdiabetes.nl

© 2009 Bayer HealthCare LLC. All Rights Reserved.

simplewins™